

(資料)別紙2 センサ服薬カレンダー設置方法

(資料)別紙2

センサ服薬カレンダー設置方法

初期設置は本文書の手順通りに実行してください。特に、ACアダプタは間違った機器に接続すると機器破損の恐れがありますのでお気を付けてください。

連絡先

機器が正常動作しない場合、万一手順を間違った場合などは、下記にお問い合わせください。  
 慶應義塾大学薬療情報学部三次仁研究会  
 電 話：03-3516-0620

機材の一覧

- ・カレンダー本体  
 他の機器とは別種でお送りしているカレンダー自体
- ・カレンダー本体用ACアダプタ  
 「カレンダー用」のラベルつき
- ・GW (ゲートウェイ)  
 銀色の機器
- ・GW用ACアダプタ  
 「GW用」のラベルつき
- ・Bishop  
 Bishopと書かれた白色の機器
- ・Bishop用のACアダプタ  
 「Bishop用」のラベルつき
- ・USBドングル (USB延長ケーブルつき)  
 ・LANケーブル (藍色)

設置手順の概略

機器を Bishop・GW・カレンダーの順に起動します。

設置手順

1. BishopにACアダプタを接続します。図16の「Bishop用」のラベルの貼られたACアダプタを、図17の機器に接続してください。



図 1 Bishop用ACアダプタ



図 2 Bishop

2. BishopのLINKランプが緑色になるまで待ってください。数分かかります。

3. 褐色のLANケーブルでBishopとGWを接続してください。Bishopの接続口は図18、GWの接続口は図19のとおりです。



図 3 BishopのLANケーブル接続口



図 4 GWのLANケーブル接続口

4. 図20のように、GWへUSBドングルを接続してください。GWのUSB接続口は2つありますが、どちらでもかまいません。

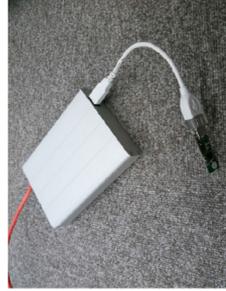


図 5 USB ドングルを接続した GW

5. GW に AC アダプタを接続します。図 21 の「GW 用」のラベルの貼られた AC アダプタを図 7 のように GW に接続してください。



図 6 GW 用 AC アダプタ 図 7 AC アダプタを接続した GW

6. 3分お待ちください。

7. カレンダーに AC アダプタを接続します。図 23 の「カレンダー用」のラベルの貼られた AC アダプタを、図 24 のようにカレンダーに接続してください。AC アダプタの接続口はカレンダー裏面のボックス上にあります。



図 8 カレンダー用 AC アダプタ 図 9 AC アダプタを接続したカレンダー

以上で設置は完了です。