


嗅覚テスト、味覚テスト実施説明書

1. 嗅覚テスト（オープンエッセンス）

- ① 袋を開けて 12 枚のカードを出してください。
- ② A から順番に角の赤い線の部分からカードを開いて、左のページの丸の部分のにおいをかいでください。
- ③ 開いた右のページの 6 つの選択肢の中から当てはまるもの、または最も近いものを、解答用紙に○をつけてください。スマートフォンに直接入力しても構いません。
- ④ 12 枚のカードすべてにお答えください。
- ⑤ 解答後、スマートフォン、パソコンへの入力を忘れないでください。
- ⑥ 嗅ぎ直したい場合は、もう一度折りたたんで○の部分をごすればにおいが出てきます。
- ⑦ 終了後は廃棄用のビニール袋に入れて、次の味覚テストの紙とともに捨ててください。

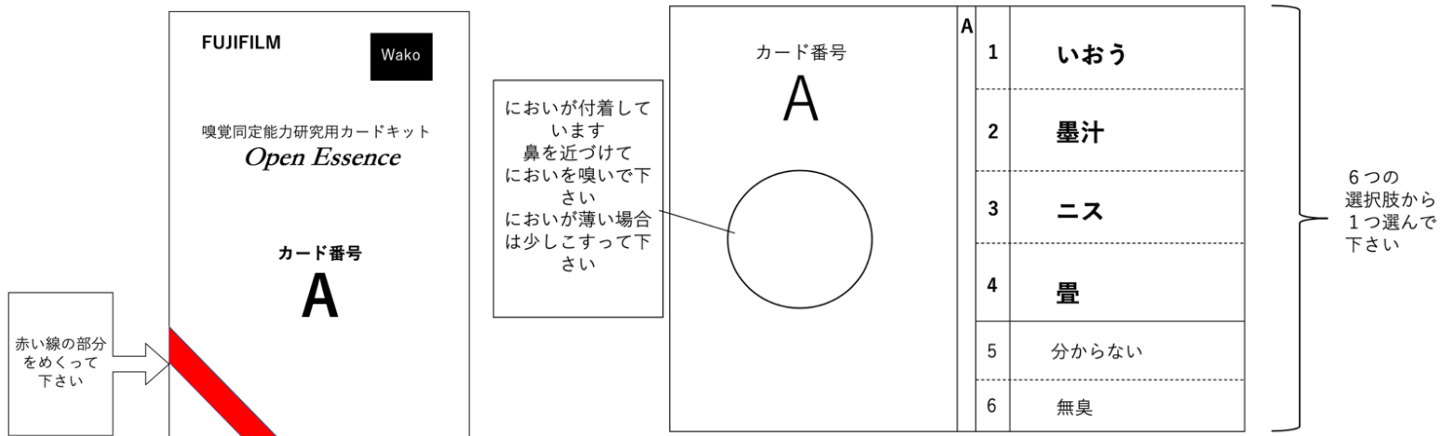

嗅覚テスト 解答用紙


正しいまたは近いと思うものの番号に○をつけてください。

A	1いおう	2墨汁	3ニス	4畳	5わからない	6無臭
B	1腐敗臭	2皮革	3材木	4畳	5わからない	6無臭
C	1線香	2はちみつ	3コーヒー	4香水	5わからない	6無臭
D	1線香	2メントール	3かび	4畳	5わからない	6無臭
E	1バナナ	2りんご	3ピーナッツ	4みかん	5わからない	6無臭
F	1コーヒー	2パイナップル	3カレー	4バター	5わからない	6無臭
G	1消毒液	2家庭用ガス	3いおう	4蒸れた靴下 汗臭い	5わからない	6無臭
H	1草	2ばら	3りんご	4干しぶどう	5わからない	6無臭
I	1いおう	2線香	3畳	4ひのき	5わからない	6無臭
J	1家庭用ガス	2皮革	3蒸れた靴下 汗臭い	4みそ	5わからない	6無臭
K	1練乳	2チョコレート	3シナモン	4ピーナッツ	5わからない	6無臭
L	1材木	2コーヒー	3わさび	4炒めたニン ニク	5わからない	6無臭

解答後はスマホ、パソコンに入力してください。

2. 味覚テスト（テーストストリップス）

- ① 食後 1 時間以上たった後に行ってください。
- ② 水を入れたコップを準備してください。
- ③ 紙袋の中から 19 枚の検査紙を出してください。
- ④ まず水で口をゆすいで飲んでください。
- ⑤ 1 の紙から順に舌でなめて、解答用紙の選択肢の中で当てはまるもの、または最も近いものに○をつけてください。スマートフォンに直接入力しても構いません。
- ⑥ 解答後、スマートフォン、パソコンへの入力を忘れないでください。
- ⑦ 舐めた後の紙は、その都度、ビニール袋に入れてください。
- ⑧ 2、4、7、9、12、14、17、19 の後に水で口をゆすいでください。

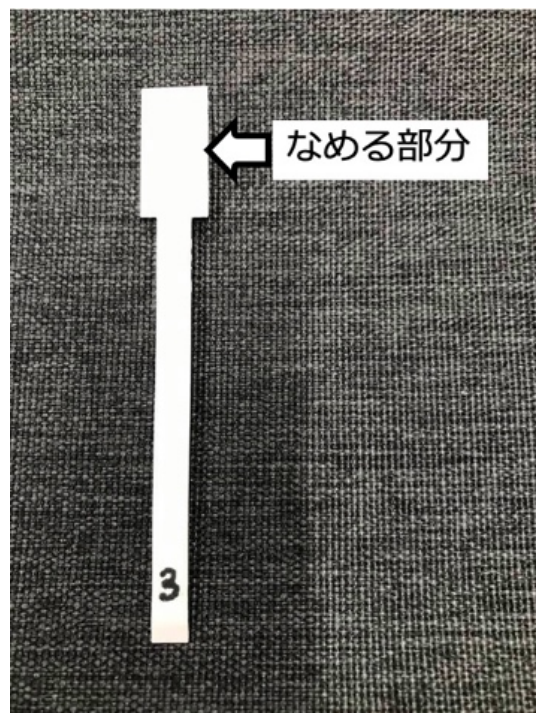

味覚テスト 解答用紙

正しいまたは近いと思うものの番号に○をつけてください。

1	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
2	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
3	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
4	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
5	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
6	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
7	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
8	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
9	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
10	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
11	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
12	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
13	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
14	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
15	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
16	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
17	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
18	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味
19	1苦い	2すっぱい	3塩からい	4甘い	5わからない	6無味

解答後はスマホ、パソコンに入力してください。